



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

SIGILLI IN PLASTICA CON INDICATORE DI VAPORE
PLASTIC SECURITY SEAL WITH STEAM INDICATOR
SCEAU DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE AVEC INDICATEUR DE VAPEUR
SELLO DE SEGURIDAD PLÁSTICO CON INDICADOR DE VAPOR

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

Descripción del producto

El Sello de Recipientes se ha desarrollado para su uso en recipientes rígidos para bloqueo seguro antes de tener lugar la esterilización. Proporciona la evidencia de que el recipiente no fue abierto entre la esterilización y el punto de uso.

Proporciona un indicador de vapor Tipo 1 para discernir si un contenedor ha sido esterilizado o no (si se suministra).

El indicador de Tipo 1 no ofrece garantías sobre la esterilidad del envase ni su contenido.

Características

Este Sello de Recipientes se compone de un plástico azul o rojo resistente a alta temperatura y una tinta de vapor de indicación especial (si se suministra) que cambia a un color final (verde) bajo condiciones de esterilización por vapor. Las tintas y los plásticos que se emplean son no tóxicos y libres de metales pesados.

Las dimensiones de los Sellos de Recipientes son de 2,8 x 4 cm (cerrado).

Recomendaciones de uso

Este Sello de Recipientes se recomienda para parámetros de ciclos de esterilización de vapor entre 121°C - 15 min y 134°C - 3,5 min.

Advertencia

No utilice este Sello de Recipientes sin el indicador de vapor pueden utilizarse en cualquier otro ciclo de esterilización (EO/FO/Plasma).

Instrucciones de uso

Coloque el Sello de Recipientes con su pasador a través del seguro y cerrar. Tras la esterilización, el indicador de vapor (si se suministra) debería haber alcanzado el color final (verde).

Almacenamiento

Mantener los Sellos de Recipientes en un lugar seco y protegido de la luz, preferiblemente en la caja y bolsas plásticas, y a una temperatura de entre 10 y 40°C, la humedad relativa debe estar entre el 20 y el 80%.

No exponga los Sellos de Recipientes a agentes esterilizantes u otros productos químicos de ningún tipo.






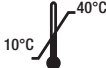


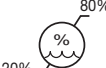

Vida útil

Los Sellos de Recipientes tienen una vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación, cuando se almacena en las condiciones recomendadas. La fecha de fabricación y de caducidad, así como el número de lote se indican en la etiqueta de embalaje.

No utilice los Sellos de Recipientes tras la fecha de caducidad.

Cumplimiento de estándares

Los Sellos de Recipientes para procesos de esterilización a vapor se fabrican según el estándar EN ISO 11140-1:2014 para indicador de vapor Tipo 1.

Simboli - Symbols - Symboles - Símbolos				
	Leggere le istruzioni per l'uso Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Consultar las instrucciones de uso		Data di scadenza Expiration date Date d'échéance Fecha de caducidad	 Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso Caution: read instructions (warnings) carefully Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place À conserver dans un endroit frais et sec Conservar en un lugar fresco y seco		Data di fabbricazione Date of manufacture Date de fabrication Fecha de fabricación	 Conservare tra 10 e 40°C Store between 10 and 40°C À conserver entre 10 et 40°C Conservar entre 10 y 40°C
	Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight À conserver à l'abri de la lumière du soleil Conservar al amparo de la luz solar		Numero di lotto Lot number Numéro de lot Número de lote	 Limite umidità Moisture limitation Limites d'humidité Limitación de humedad
	Codice prodotto Product code Code produit Código producto			

REF 37332

Importato e distribuito da / Imported and distributed by:
 Importé et distribué par / Importado y distribuido por:
Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 Made in Turkey

