

Beoogde gebruikscondities

Omgeving

- Beperkte functionaliteit bij natte omstandigheden
- Duidelijk en onbelemmerd zicht op het punt van gebruik

Gebruiksfrequentie

Geen andere beperkingen dan de levensduur van de batterij of lamp

Afvoer

- Fluorescente lamp – voer de lamp af conform de richtlijnen voor afvoer van fluorescente lampen
- Biologisch gevaar – voer de UV-lamp af in overeenstemming met de procedures van de instelling

INSTRUCTIES:

Verwijder het beschermplastic om de schakelaar van de Wood's Light te kunnen bedienen.

VERVANGINGSINSTRUCTIES FLUORESCENTE LAMP

Druk beide uiteinden van het (B) lampdeksel in en schuif uit positie.

Verwijder de fluorescentielamp door deze 90 graden te draaien en uit te trekken. Vervang de lamp. Plaats het (B) lampdeksel terug en klik vast.

OPMERKING: De LED-lamp (A) is niet vervangbaar.

VERVANGINGSINSTRUCTIES BATTERIJEN

Schuif het batterijdeksel open (C). Verwijder alle 4 de batterijen. Vervang de batterijen, let daarbij op de polariteit.




OFF/No Light



Fluorescent Lamp On



LED Lamp On

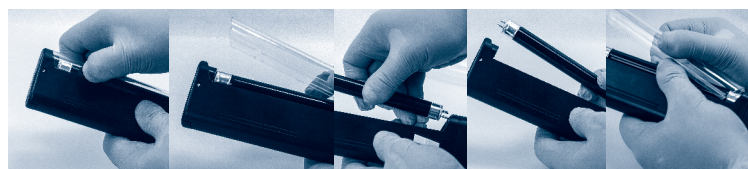

LET OP:

Vermijd langdurige directe blootstelling van de ogen.

SPECIFICATIES:

- Fluorescente lamp (vervangbaar (REF UV59B)) – ongeveer 365 nm
- LED-lamp (lichtgevende diode) (niet vervangbaar)
- Voeding – 6V (4 vervangbare AA-batterijen)

Medisch doel/indicatie

De UV Wood's Light is een lichtgewicht, op batterijen werkende, draagbare lamp die in de hand wordt gehouden en optioneel ultraviolet licht geeft.

Gebruik

Wordt gebruikt voor diagnostische visualisatie en de detectie van sperma.

Patiëntenpopulatie

Geen beperkingen

Gebruikslocatie en locatievoorwaarden


Gebruikslocatie – huid

Locatievoorwaarden – geen beperkingen

Profiel van beoogde gebruiker

Dit hulpmiddel is bedoeld voor gebruik door getrainde medische zorgverleners.

R_x ONLY

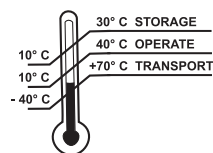

STORAGE
10 to 75 % non-condensing

OPERATE
30 to 75 % non-condensing

TRANSPORT
10 to 100 % including condensation

Bovie

Bovie Medical Corporation
5115 Ulmerton Road
Clearwater, Florida 33760 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands

