

QUICK SPLINT

SET

REF PNE244



I ISTRUZIONI PER L'USO

GB INSTRUCTIONS

F MODE DE EMPLOI

E MODO DE EMPLEO

P INSTRUÇÕES

 PVS SPA VIA LEONARDO DA VINCI 18 20051 CASSINA DE PECCHI (MI) ITALY

2021-7-30(A/1)
EU Regulation 2017/745(MDR)





PORTUGUES

INDICACOES : insufláveis QUICK SPLINT são utilizadas para imobilizar membros partidos ou feridos. Este sistema é especialmente indicado para limitar todos os movimentos durante a trasportação e daí melhorar o conforto do paciente e exercer uma pressão uniforme , em volta do ferimento , de modo a controlar o sangramento. QUICK SPLINT material permite procedimentos de raio-X e portanto permite manter a posição por todo o processo de raio-X daí minimizando o desconforto do paciente.

DESCRICAO : QUICK SPLINT é produzido em PVC e deverá ser cheio de ar através da bomba Insuflável QUICK SPLINT está disponível em 4 modelos :


1 - PERNA INTEIRA

2 - TRONUSELO-PE

3 - BRACCO INTEIRO

4 - ANTEBRACO-MAO

5 - POMPA

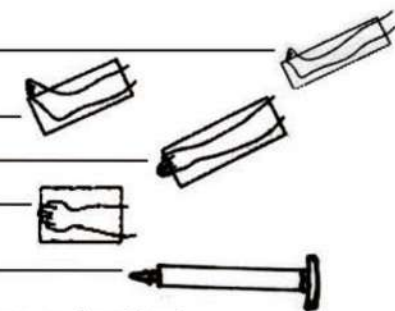

INSTRUCOES : como colocar o Insuflável QUICK SPLINT coloque e embrulhe-o em redor do membro lesionado e feche o fecho. Sopre o ar através do bomba. **Como liberar o Insuflável QUICK SPLINT** abra o fecho e retire o ar dele , pressionando a válvula, deste modo pode retirar o membro lesionado.



ATENCAO : deverá ser colocado por uma pessoa especializada. Pare de usar se o dano material ou vazamento de ar for encontrado.

INSTRUCOES DE LIMPEZA : apos a utilização do insuflável QUICK SPLINT , ele deverá ser cuidadosamente lavado com apenas água e sabão. Ele pode ser também desinfetado com uma solução líquida anti-bacteria produzido em conformidade de acordo com o novo MDR 745/2017.

ARMAZEIAGEM : num local fresco e livre de pó.

É necessário comunicar qualquer acidente grave ocorrido em relação ao DM fornecido pela PVS SPA ao Fabricante e às autoridades competentes