



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PORTUGUESE

CINTA DE CONTENÇÃO PARA CAMA

AVISOS

Antes de efetuar qualquer operação, inspecione visualmente a integridade do dispositivo. Caso o produto apresente anomalias, contacte imediatamente o ponto de venda onde foi efetuada a compra. A Erregi s.a.s. não assume qualquer responsabilidade pela utilização indevida do dispositivo. No caso de se verificar um acidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, solicita-se que informe a ocorrência ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e / ou o paciente está estabelecido.

DESCRIÇÃO

Art 24/07: Cinta de contenção para cama de casal em 100% algodão. O sistema de fecho ocorre através de chave magnética. A chave magnética é utilizada para a abertura dos blocos de segurança, 1 bloco é utilizado para bloquear a faixa superior à volta da cintura do paciente, os outros dois blocos são utilizados para ancorar as fitas à longarina da cama. O dispositivo é utilizado para bloquear o paciente que não coopera e que precisa de terapias. É composta por duas faixas, a mais interna é colocada à volta da cintura do paciente, a mais externa é fixada nas longarinas da cama através de fitas e blocos de segurança.

A cinta permite ao paciente a posição de supina e lateral.

Art 24/07/01: Cinta de contenção para cama de solteiro em 100% algodão. O sistema de fecho ocorre através de chave magnética. A chave magnética é utilizada para a abertura dos blocos de segurança, o bloco é utilizado para bloquear a faixa superior à volta da cintura do paciente. O dispositivo é utilizado para bloquear o paciente que não coopera e que precisa de terapias. É composta por uma faixa, a ser colocada à volta da cintura do paciente, e duas fitas com fechos de gancho a fixar à longarina da cama. **A cinta permite ao paciente apenas a posição de supina.**

INDICAÇÕES

Dispositivos utilizados para a contenção dos pacientes acamados.

CONTRAINDICAÇÕES

Não foram detetadas contra-indicações exceto em casos de sensibilidade verificada aos materiais constituintes.


CUIDADOS DE UTILIZAÇÃO

O dispositivo só pode ser aplicado exclusivamente por pessoal médico e paramédico. A cinta não deve ser utilizada sobre a pélvis ou sobre a caixa torácica. **Dispositivos com sistema de fecho magnético, não utilize em pacientes aos quais foi aplicado um estimulador para o coração, poderá provocar taquicardia.** Adapte bem a cinta ao paciente, deve passar uma mão espalmada entre o paciente e a cinta. Verifique sempre se os fechos estão bem engatados; se isso não ocorrer, a segurança do paciente poderá ser comprometida. Caso os fechos não se abram, as fitas podem ser cortadas com cortadores ou tesouras. Utilize sempre o dispositivo vestindo roupas de proteção pessoal. Dispositivo não ignífugo.

COMPOSIÇÃO

100% ALGODÃO.

MODO DE LAVAGEM

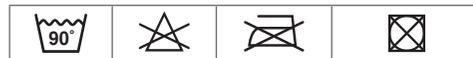

Atenção: remova as chaves e os blocos antes da lavagem, a sua funcionalidade pode ser comprometida se entrarem em contacto com os líquidos.

A empresa produtora não se responsabiliza por quaisquer alterações das características técnicas do apoio em caso de inobservância dos métodos de lavagem.

DESINFEÇÃO

Utilize produtos com supervisão médico-cirúrgica.

CONSERVAÇÃO

Conserve ao abrigo de fontes de luz, calor e humidade.

ELIMINAÇÃO

Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos em vigor relativos à proteção do ambiente e à recolha seletiva de resíduos.

| | | | |
|-----|----------------|----|--------------------|
| REF | Código produto | MD | Dispositivo médico |
|-----|----------------|----|--------------------|

| | | | |
|-----|---|--|----------------------------------|
| LOT | Número de lote | | Fabricante |
| | Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745 | | Consulte as instruções de uso |
| | Guardar ao abrigo da luz solar | | Armazenar em local fresco e seco |
| | Data de fabrico | | Sem látex de borracha natural |

NÃO remova a etiqueta do Dispositivo Médico, pois permite a rastreabilidade do produto fornecido (Fabricante, IUD, número do lote, código do produto).

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF 24/07/01 (Gima 43185)
24/07 (Gima 43186)
24/07 (Gima 43187)

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it
MADE IN ITALY

