

SKOSKYDD FÖR ENGÅNGSBRUK UTAN GLIDSKYDD ΜΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

SE

Produktnamn Skoskydd för engångsbruk utan glidskydd

Produktkod FGSCNAS-PP35 (21094)

Produktmodell Normalt skoskydd, 17x40 cm

Struktur och komposition Skoskyddet är gjort av 35gPP, med gummi-band för fixering.

Avsedd användning Produkterna är huvudsakligen använda för allmän isolering inom öppenvård, akutmottagning, undersökningsrum, rengöringsrum, laboratorier med mera. De är avsedda att användas av sjukvårdspersonal på sjukhus och kliniker för att uppehålla en god hygienisk nivå och bidra till kontroll av infektioner.

Kontraindikationer Produkterna kan endast användas en gång och ska omedelbart användas efter att förpackningen öppnats. Om förpackningen skadats, produkten är våt eller möjlig. Använd inte.

Hur produkten används

1. Öppna produktförpackningen och ta ur skoskyddet, Sträck ut fötterna och sätt på skoskydden över fötterna.
2. Placera skoskydden så att du är säker på att skoskydden sitter bra på fötterna.

Förvaring Förvaras i ett rent rum med relativ fuktighet som inte överskrider 80%, inga frätande gaser, och förvaras svalt, torrt och väl ventilerat.



Varning

1. Denna produkt är en engångsprodukt, använd inte igen.
 2. Denna produkt är för engångsbruk, dela aldrig din produkt med andra.
 3. Förbjudet att använda när förpackningen eller mössorna är skadade.
- Ann.: Alla allvarliga skador som uppstått i relation till anordningen ska rapporteras till tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där användaren eller patienten befinner sig.**




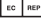





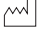










Giltighet 3 år.

Tillverkningsdatum Se datum på förpackningen

Utgångsdatum Se datum på förpackningen

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

	SE Produktkod GR Κωδικός προϊόντος		SE Skyddas från solljus GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		SE Förvara på svalt och torrt ställe GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		SE Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen GR Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	SE Satsnummer GR Αριθμός παρτίδας		SE Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		SE Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (εναστάσεις)		SE Engångsanordning, får ej återanvändas GR Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου
	SE Tillverkare GR Παραγωγός		SE Tillverkningsdatum GR Ημερομηνία παραγωγής		SE Temperaturgräns GR Οριο θερμοκρασίας		SE Läs bruksanvisningen GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	SE Ej steril GR Οχι αποστειρωμένο		SE Utgångsdatum GR Ημερομηνία λήξεως		SE Medicintekniska produkten GR Ιατρική συσκευή		SE Använd inte en förpackning som är skadad GR Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι καταστραμμένη
	SE Fuktighetsgräns GR Οριο υγρασίας		SE Ömtålig, hanteras varsamt GR Εύθραστο, χειρίζεστε με προσοχή		SE Den här sidan upp GR Αυτή είναι η πάνω πλευρά		SE Hanteras varsamt GR Χειρίζεστε με προσοχή

REF FGSCNAS-PP35 (GIMA 21094)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

مستورد عن طريق Importerad av /

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Humiss Beratung GmbH
Gneisenaustraße
8.40477, Düsseldorf, Deutschland

